

Aide à la prise des repas **NELSON**

Appareil manuel pour manger
ISO 15.09.27

MOUVEMENTS COMPENSÉS

Nelson aide l'utilisateur à coordonner ses mouvements lors des repas, soit en freinant les mouvements, soit en n'offrant aucune résistance dans les mouvements de l'assiette à la bouche.

FACILITÉ D'INSTALLATION

Nelson peut être monté facilement sur une grande majorité de tables. Il s'utilise aussi bien à gauche qu'à droite.

Nelson est un produit de compensation mécanique de la perte de fonctions du membre supérieur qui s'utilise dans le cadre de la prise de repas.

Il est spécialement conçu pour les personnes atteintes de déficiences musculaires, ayant une force limitée dans les bras et les mains et/ou qui ne peuvent utiliser leur force musculaire que pendant un temps limité.



© FOCAL MEDITECH

Garantie : 2 ans
Matériaux : plastique
Longueur du bras : 50,5 cm
Longueur du plateau : 62 cm
Homologation du système : CE

Fabricant :
FOCAL MEDITECH
Droogdokkeniland 19
5026 SP Tilburg
Pays-Bas
info@focalmeditech.nl
<http://www.focalmeditech.nl/>

Fournisseur français : néant

Tarif TTC : non communiqué

Remboursement de la Sécurité Sociale : Non

Lien :
<https://www.focalmeditech.nl/en/content/Nelson>

Fonctionnement du Nelson

Nelson est une aide technique qui s'utilise dans le cadre de **la prise de repas**.

- Facile d'utilisation, il suffit que l'utilisateur place sa main sur le bras principal pour amener la cuillère de l'assiette à la bouche.

Nelson **aide** l'utilisateur à **coordonner** ses mouvements lors des repas, soit en freinant les mouvements, soit en n'offrant aucune résistance dans les mouvements de l'assiette à la bouche.

- Il est possible d'**ajuster le degré de résistance** et la caractéristique d'**amortissement**. Le paramètre est facile à changer.

- L'**assiette**, fournie avec le Nelson, est munie d'un **bord surélevé** contre lequel les aliments peuvent être saisis avec une cuillère. Ce bord permet également d'araser les gouttes lors de la consommation de soupe, par exemple.

L'assiette est **fixée au Nelson** mais elle effectue cependant des **rotations sur elle-même**, permettant ainsi à l'utilisateur d'accéder à toutes les zones de l'assiette.

- Le Nelson est solidement **fixé à la table grâce à ses attaches**.
- De taille réduite, le Nelson est aisément **transportable**.

- Le Nelson est **livré avec** :
 - **une assiette** aux rebords saillants
 - **une cuillère** en plastique

- Facile d'entretien, la cuillère et l'assiette peuvent être mises au **lave-vaisselle**.

Déclinaisons du Nelson

- En option, le Nelson peut être équipé de **différentes cuillères** et d'un **porte-gobelet**.



© FOCAL MEDITECH

AFM TÉLÉTHON
INNOVER POUR GUERIR 

Association reconnue d'utilité publique

1, rue de l'Internationale - BP 59 - 91002 Évry cedex
Tél : 33 (0) 1 69 47 28 28 - Fax : 33 (0) 1 60 77 12 16
Siège social : AFM - Institut de Myologie
47 - 83, boulevard de l'Hôpital - 75651 Paris cedex 13
www.afm-telethon.fr

Rédaction :
Cellule Innovation AFM-Téléthon
01 69 13 21 06
celluleinnovation@afm-telethon.fr