

Support d'avant-bras **ARMON AYURA**

*Supports de bras pour permettre
des activités manuelles
ISO 24.18.27*

MOUVEMENTS FACILITÉS

Armon Ayura compense le poids du bras par microgravité, un système spécialement conçu pour les personnes atteintes de déficiences musculaires.

Les mouvements sont facilités : souples, naturels, ils ne nécessitent que peu de force et peu d'énergie.

Armon Ayura suit le mouvement naturel du bras, ainsi l'utilisateur peut le déplacer dans les trois dimensions.

Le bras de l'utilisateur est soutenu en continu. Il peut ainsi décharger ses épaules, son cou et son dos.

COMPATIBILITÉ

Armon Ayura est compatible avec les fauteuils roulants électriques.

Il existe une version pour être utilisée à droite et une version pour être utilisée à gauche.

Nota bene : ces versions ne peuvent pas s'inverser : le choix se fait donc avant la commande auprès du revendeur.

Armon Ayura est un produit de compensation de la perte de fonction du membre supérieur. Électrique, il propose de 2 à 6 fonctions. Il est spécialement conçu pour les personnes atteintes de déficiences musculaires, ayant une force limitée dans les bras et les mains et/ou qui ne peuvent utiliser leur force musculaire que pendant un temps limité.



© ERGO-DIFUSION

Garantie : 2 ans

Force de soutien :

- version adulte : de 900g à 4,5Kg

- version enfant : 600g à 2,5Kg

Matériaux : Aluminium

Homologation du système : CE

Fabricant :
 ARMON PRODUCTS B.V.
 De Nestel 7
 5107 RL Dongen
 Pays-Bas
 +31 10 4714187
 info@armonproducts.com
 www.armonproducts.com

Fournisseur français :
 ERGO-DIFFUSION
 5 rue Debussy BP 97405
 35174 Bruz cedex
 02 99 50 80 57
 www.ergo-diffusion.com/

Tarif TTC : à partir de

- ≈ 8 930 € pour 2 fonctions
- ≈ 15 284 € pour 6 fonctions

Remboursement de la Sécurité Sociale : Non

Lien : <http://ergo-diffusion.com/wp-content/uploads/2015/01/Fiche-commerciale-Ayura.pdf>

Rédaction :

Cellule Innovation AFM-Téléthon
 01 69 13 21 06
 celluleinnovation@afm-telethon.fr

Fonctionnement du support d'avant-bras Armon Ayura

Grace à son **système de microgravité**, l'Armon Ayura offre à l'utilisateur de **très grandes amplitudes de mouvement** et ce, dans toutes les directions.

L'Armon Ayura se pilote avec une **télécommande étanche** de 2, 3, 4, 5 ou 6 boutons personnalisables et ne nécessitant qu'une très faible force.

En un clic de contacteur, l'utilisateur peut faire passer son bras d'une position basse à une position haute.

La force de soutien de l'Armon Ayura est réglable : de 900g à 4,5Kg pour la version adulte et de 600g à 2,5Kg pour la version enfant. Ce **réglage de la compensation du poids du bras se fait électriquement**, par l'utilisateur lui-même à l'aide d'une télécommande ou de contacteurs.

Le faible encombrement de l'Armon Ayura lui permet de se **fixer sur les fauteuils roulants électriques**.

Les différents modèles du support d'avant-bras Armon Ayura

Différentes versions

- L'Armon Ayura existe en **version bras droit** ou en **version bras gauche**. Ces versions ne peuvent s'inverser. Le choix se fait donc avant la commande auprès du revendeur.
- L'Armon Ayura existe en **version adulte** ou en **version enfant**.

Différents modules

L'Armon Ayura se compose de différents modules, pré- installés ou ajoutés ultérieurement en fonction de l'évolution de la pathologie.

- **Blocage vertical** : bloque le mouvement vertical, votre bras est donc en suspension.
- **Blocage horizontal** : verrouille le mouvement gauche/droite.
- **Inclinaison** : La base de l'Armon Ayura peut avancer ou reculer. Ainsi votre amplitude d'action s'agrandit (chercher un objet plus loin).
- **Télécommande sans fil** : permet de commander l'Armon Ayura avec son smartphone ou sa tablette Android

Options

En option, l'Armon Ayura s'accompagne :

- D'un **soutien de la main** au niveau de la paume, du poignet et/ou du coude
- De **plusieurs choix de la gouttière de bras** sont disponibles. Là-aussi, la gouttière doit être choisie avant de valider la commande auprès du revendeur.