

Support d'avant-bras GOWING

*Supports de bras pour permettre
des activités manuelles
ISO 24.18.27*

MOUVEMENTS FACILITÉS

Le Gowing compense le poids du bras de l'utilisateur atteint de déficiences musculaires.

Il suit le mouvement naturel du bras qui peut se déplacer dans les trois dimensions.

COMPATIBILITÉ

Le Gowing est compatible avec les fauteuils roulants électriques. Il peut être installé à gauche, à droite ou des deux côtés de l'utilisateur.

Le Gowing est un support de bras dynamique conçu pour compenser les pertes de fonctions du membre supérieur, notamment chez les personnes atteintes de déficiences musculaires.



© FOCALMEDITECH

Garantie : 2 ans
 Homologation du système : CE

Fabricant :
 FOCAL MEDITECH
 Droogdokkeneiland 19
 5026 SP Tilburg
 Pays-Bas

Fournisseur français :
 Néant

Tarif TTC : non communiqué

Remboursement de la Sécurité Sociale : Non

Lien :
<https://www.focalmeditech.nl/en/content/gowing>

Fonctionnement du support d'avant-bras Gowing

- Le Gowing permet de compenser le poids du bras de l'utilisateur via un système de microgravité.

Celui-ci prend en compte, en temps réel, la force résiduelle de l'utilisateur, le poids de la charge à transporter ainsi que la pesanteur.

Quel que soit le poids supporté, les mouvements de la main vers la bouche par exemple, sont facilités.

- Le Gowing est également capable de **maintenir la suspension du bras** sans que l'utilisateur n'emploie d'énergie supplémentaire pour le faire. Le bras libre est ainsi laissé sans contrainte dans l'espace.

- Une option permet de **verrouiller le bras dans une position donnée** et ainsi d'empêcher le bras de se déplacer involontairement.

Cela est particulièrement utile lors des déplacements en fauteuil roulant électrique ou au moment de corriger son positionnement. Ce verrouillage se fait **via un contacteur**.

- Discret et design, le Gowing se monte sur une **chaise** ou sur un **fauteuil roulant électrique**.

- Le bras est suspendu dans une **attelle souple maintenant le coude**.



Association reconnue d'utilité publique

1, rue de l'Internationale - BP 59 - 91002 Évry cedex
 Tél : 33 (0) 1 69 47 28 28 - Fax : 33 (0) 1 60 77 12 16
 Siège social : AFM - Institut de Myologie
 47 - 83, boulevard de l'Hôpital - 75651 Paris cedex 13
www.afm-telethon.fr

Rédaction :
 Cellule Innovation AFM-Téléthon
 01 69 13 21 06
celluleinnovation@afm-telethon.fr